


Snabbhandledning

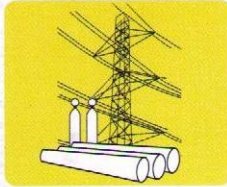

1. Avlägsna eventuella faror!

Avlägsna orsaken till faran eller flytta bort personen från faran. Var noga med din egen säkerhet!



2. Kontrollera om det finns några livstecken

Skaka personen. Tala högt till personen.



3. Kontrollera luftvägarna

Kontrollera andningen. Öppna luftvägarna genom att böja huvudet bakåt-uppåt vid behov.




5. Utför HLR

Gör två inblåsningar. Tryck hårt och snabbt i en takt på 100 slag per minut med ca 3-5 cm djup mitt på patientens bröstorg. 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar.




6. Starta PDU 400

Starta PDU 400 och följ röstinstruktionerna.

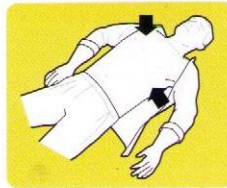

7. Frigör bröstkorgen från kläder

Frigör patientens bröstorgs område från kläder. Ta bort alla eventuella metallföremål (smycken) från bröstorgs området. Kontrollera att den drabbade personens bröstorg är torr. Raka vid behov bröstkorgen på den del av bröstkorgen där du vill placera elektroderna.

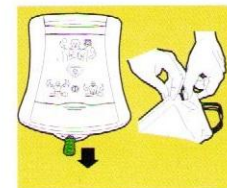

8. Öppna elektrodförpackningarna

Dra i den gröna fliken för att öppna elektrodlådan och riv upp elektrodpåsen.

Fortsättning på nästa sida



9. Placera elektropaddlarna

Följ röstinstruktionerna. Dra av skyddsfolien från elektropaddlarna och placera dem på bröstkorgen i enlighet med figuren.



10. Vidrör INTE patienten

Se till att ingen vidrör patienten när PDU 400 analyserar och levererar en chock.



PDU 400 levererar endast en chock om så behövs. Röstinstruktionerna talar om för dig när du ska trycka på chockknappen.

11. Fortsätt

Fortsätt att följa röstinstruktionerna.

PDU 400 ber dig att fortsätta med HLR och leverera chocker vid behov.

Om den drabbade personen vaknar upp till medvetande lämnar du kvar elektropaddlarna på plats och följer röstinstruktionerna tills ambulansen kommer.

PDU 400 skadar INTE en person som har vaknat upp eller vaknar upp till medvetande.



HeartSine®

Huvudkontor:

HeartSine Technologies Inc. / 121 Friends Lane / Suite 400 / Newtown, PA 18940 / USA
Tel: 1.215.860.8100 / Fax: 1.215.860.8192

Tillverkad av:

HeartSine Technologies Ltd. / Canberra House / 203 Airport Road West / Belfast BT3 9ED / Nordirland
Tel: +44 (0)28 9093 9400 / Fax: +44 (0)28 9093 9401

www.heartsine.com
support@heartsine.com

H024-001-207-0 (Swedish)

CE
0120